


Betjenings/Montagevejledning
Platformsgynge
Art.nr. 174 5304

Betjenings/monteringsvejledning til platformsgynge

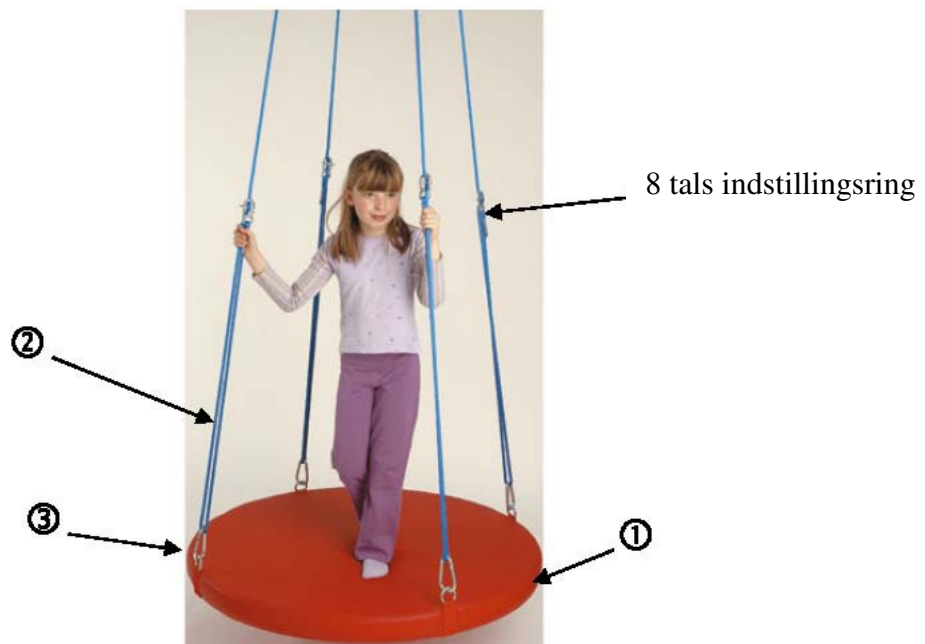

Billed 1: Platformsgynge (1-punkts ophængning)

Billedet er af det "gamle system" så opsætningen er lidt anderledes, se under punkt 2 – ophængsvejledning.

Leveringen indeholder:

1. 1 stk. platform af polyester med ringe
2. 4 stk. gyngetov af spiral-birotex 10 mm sort: l=3,5m, med øjer i tovet og ring
3. 4 stk. karabinhager en for hver ende af tovet .
4. 1 stk. "samlingskarabin"

1. Generelt

Platformsgynge er ideel til at fremme og støtte det vestibulære system. Platformen er blødt polstret og betrækket består af slidstærkt polyestervæv i kunstlæderkvalitet. Gyngen er beregnet til loftmontage og giver ved ændring af ophængspunktet forskellige gyngevarianter. (Se punkt 4 i montagevejledning)

Den maximalt tilladte vertikale belastning for platformsgynge er 120 kg.

Fastgørelsen af platformsgyngen til loftet udføres gennem ringene og gyngetovene. Disse skal ved hjælp af karabinhager* ophænges i ophængsordningen f.eks skinnebefæstigelse* eller ophængsplade med halvring.*

Platformsgyngen er kun til det retningsbestemte brug. Hvis den bruges på anden måde kan sikkerheden ikke garanteres.

2. Ophængsvejledning

Før monteringen begynder skal det sikres at ophængningen sker i et slidstærkt massivt loft, eller i træ (Ikke i hængeloft, gips eller lign.)!

Vær sikker på at der bruges den rigtige Dyvel, træskrue eller lign. til ophængsordningen. Gyngetovene 2) fastgøres til platformen ved at tovene trækkes igennem øjerne på gyngen og længden bestemmes af hvilket øje på tovet man trækker karabinhagen igennem. Derefter den store karabin gennem et øje fra hvert tov, i den ønskede højde, og gynges og tov fæstnes v.hj.a. denne karabin til den valgte loftsanordning.

3. Vedligeholdelse og kontrol

Gennem gynges bevægelsen kommer der friktion mellem ophængsordningen og gyngen, hvilket kan give slitage på ståldelen.

Hvis ståldelen mindskes med mere end 25 % er den ikke sikker mere og bør udskiftes.

Ydermere bør ståldelen mellem gynges og tov jævnligt tilses, og udskiftes når friktionen har slidt mere end 25 %.

Det er en god ide at foretage sikkerhedskontrol før hvert brug.

4. Anvendelse

Platformsgyngen kan gennem den variable ophængning udføre 4 forskellige gynges bevægelser. Billede 2 viser disse muligheder.

Bevægelsesretningen ved 4-punkt, 2-punkt, og 1-punkt systemet. Ved 1-punkts ophængning kan gyngen ved anvendelse af fjeder* yderligere svinge vertikalt.



Billede 2: Ophængsvarianter og tilhørende gyngeretninger

I vores sortiment finder I passende ophængsordninger. Væg/loftsskinnesæt* (art.nr. 2011905/2011918 afbildn. 3) egner sig optimalt til 2-punkt og 4-punkt ophængnin. Til 1-punkts ophængning kan loftspladen med halvring* (art.nr. 1773806, afbildn. 4) anvendes.

* medfølger ikke.



Billede 3: Skinnesæt
art.nr. 201 1905



Billede 4: Loftsplade
art.nr. 1773805