





<p>Enste PhysioForm Reha Klemens Enste Jakob-Ebersmann-Str. 7 55411 Bingen Tel. 06721 42646, Fax 06721 44845 Mail info@enste-reha.de . www.enste-reha.de</p>	<p>Bedienungsanleitung Lagerungsneest</p> <p>Stand Mai 2017</p>
 <p>Abb. 1 Lagerungsneest, Grundausrüstung</p>	 <p>Abb. 2 Lagerungsneest, Grundausrüstung</p>
 <p>Abb. 3 Lagerungsneest mit Baumwoll-Außenhülle</p>	 <p>Abb. 4 Lagerungsneest mit Baumwoll-Außenhülle und Bodenwanne</p>
<p>Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen durch den Kauf eines Lagerungsneestes Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung beim Produkt verbleibt.</p>	

Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme eines Lagerungsneestes:

Jedes Lagerungsneest besteht aus einer 2-Kammern-PhysioTex-Hülle, die direkt mit Polypropylenperlen gefüllt ist.

Je nach beabsichtigtem Einsatz kann das Lagerungsneest in dieser Ausführung unmittelbar und ohne Zubehör zur Lagerung eingesetzt werden (Abb. 1 + 2).

Sicherheitshinweise:

Ein Lagerungsneest darf nicht ohne Aufsicht benutzt werden.

Die korrekte Anwendung eines Lagerungsneestes bedarf einer sorgfältigen Einarbeitung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Nutzers, sodass dieser nicht in eine für ihn unkontrollierbare gefährliche Situation geraten kann. Es muss darauf geachtet werden, dass es durch die Lagerung nicht zu einer Blockierung der Atemwege blockiert werden.

Das zulässige Körpergewicht eines Nutzers ist auf maximal 100 kg beschränkt.

Wozu ein Lagerungsnest eingesetzt wird.

Ein Lagerungsnest bietet einer behinderten Person bei entsprechendem Bedarf eine stabile und doch bequeme Lagerungsfläche mit Umrandung an.

Standardausstattung und Zubehör eines Lagerungsnestes:

Als Standardausstattung sind 3 Größen lieferbar, jedoch können auch Sondermaße zur Verfügung gestellt werden.

Als Zubehör ist eine Baumwoll-Außenhülle sowie eine Bodenwanne aus Suratec-Nylon-Gewebe lieferbar.

Reinigung:

Die PhysioTex-Hülle des Lagerungsnestes ist abwaschbar. Empfehlenswert ist es, dem Wasser etwas Spülmittel als Fettlöser beizugeben.

Ebenso kann das Lagerungsnest mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel behandelt werden.

Die abnehmbare Baumwollhülle kann bis 60 Grad gewaschen werden und ist Trockner geeignet. Ebenso die Bodenwanne.

Veränderungen und unsachgemäßer Gebrauch:

Bitte nehmen Sie keine Veränderungen an einem Lagerungsnest vor.

Verwenden Sie das Produkt nur zu dem angegebenen Zweck.

Wir übernehmen keine Garantie bei eigenmächtigen Veränderungen und nicht freigegebenen Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Produkten.

Garantie:

1. Produkt-Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware als angenommen. Die Wochenfrist beginnt mit Empfang der Ware.
2. Transportschäden/Schadensmeldungen sind uns und dem Spediteur (vom Fahrer schriftlich bestätigt) sofort zu melden.
3. Für sachgemäße Ausführung übernehmen wir eine Gewähr für alle innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung nachweislich durch Werkstoff- oder Herstellungsfehler schadhaft oder unbrauchbar gewordene Teile, die sodann nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzt oder ausgebessert werden.
3. Durch Änderungen- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vornimmt, wird die Gewährleistung aufgehoben.
4. Ausgeschlossen aus der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, sowie die Folgen übermäßiger oder unsachgemäßer Beanspruchung.
5. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ablehnen oder unzumutbar verzögern.
6. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter, insbesondere Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht.