

H A I D I G

Kindergarten-, Therapiebedarf & Befestigungslösungen



Knautsack

Art.Nr. 2038100

Maximallast: 150 kg



H A I D I G O H G
Preinstraße 160
D-44265 Dortmund
E-Mail: info@haidig.de
Telefon: +49 (0) 231 - 91 28 156
Fax: +49 (0) 231 - 91 28 157

Damit's sicher ist!

Knautsack

Maximallast: 150 kg

**Sonderzubehör
separat erhältlich:**

Zweipunktaufhängung

Einpunktaufhängung

Aufhängeseil


Sicherheitskarabiner

Reißverschluß zum entfernen
und hinzufügen von Füllwatte

Knautsack

Sicherheitshinweis:

Achten Sie unbedingt auf eine fachgerechte Montage. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit. Verwenden Sie bei der Montage nur Originalteile des Herstellers!

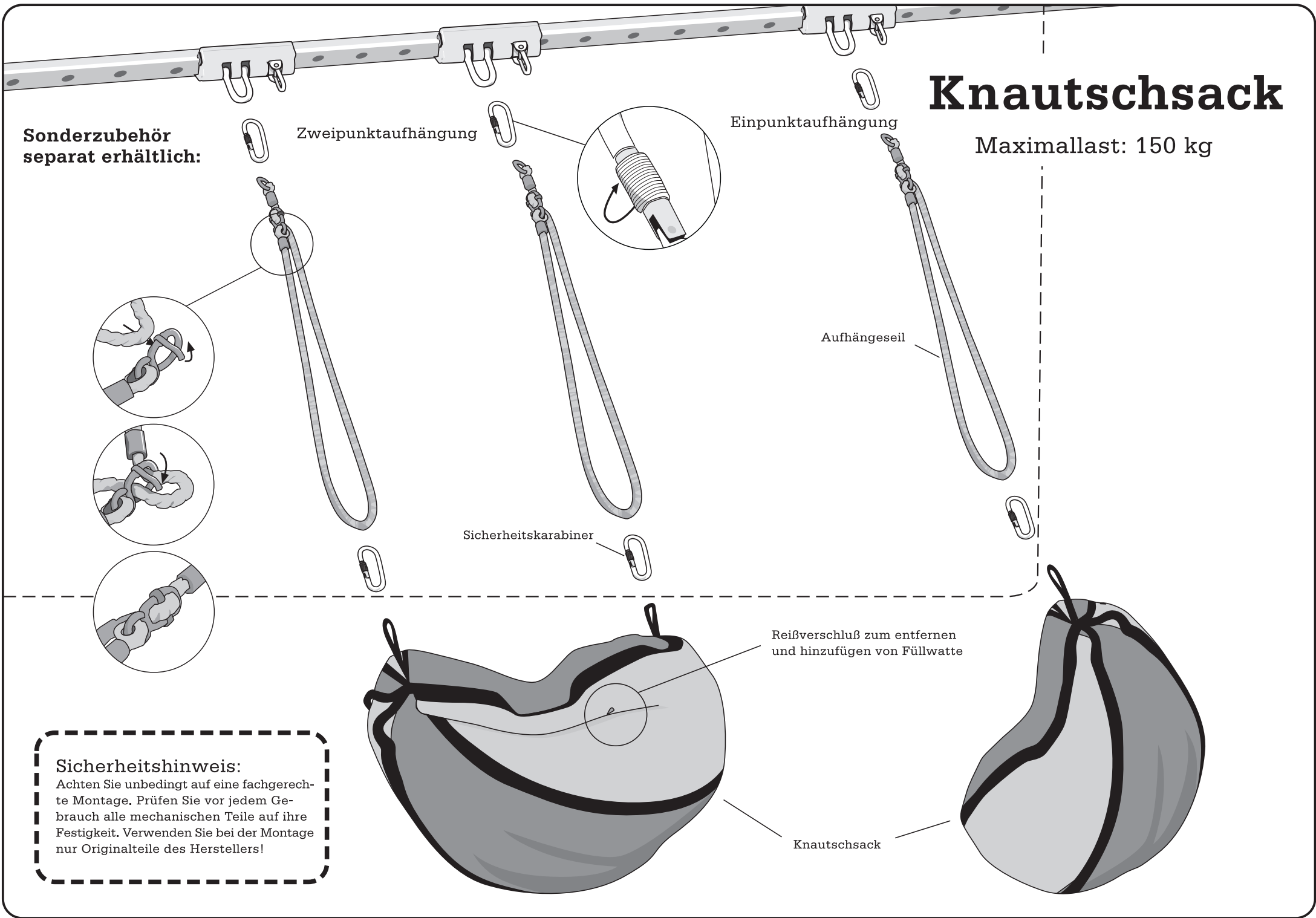

Herstellerinformation

Knautsack Artikel-Nummer: 112000

Das Produkt erfüllt die Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Sicherheitshinweise: Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar! In jedem Fall sollte der Patient angemessene Bekleidung (Sportkleidung, Turnschuhe oder Ähnliches) tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Handreifen, Ohrringe, Piercings oder Ähnliche) ablegen.

Kontraindikationen bei Therapie: Kontraindikationen, die sich auf das Produkt beziehen, sind derzeit nicht bekannt. Die Verwendung des Produktes gilt als kontraindiziert, wenn nach Meinung des verantwortlichen Fachpersonals (Physiotherapeut/In, Ärztin/Arzt) eine Anwendung des Produktes eine Gefährdung des Patienten hervorrufen würde. Zum Beispiel aufgrund des Allgemeinzustandes des Patienten oder wenn eine körperliche Belastung bzw. die gewählte Methode mit dem mitgelieferten Therapiegerät als solche kontraindiziert ist.

Maximallast: 150 kg.

Material: Cordura dunkelblau/rot, Polypropylenband.

Größe: ca. 135 x 90 cm.

Gewicht: ca. 10,3 kg mit Füllung ohne Zubehör.

Sonstiges: mit 2 Polypropylenschlaufen zum Aufhängen, gefüllt mit herausnehmbarer Polyester-Wattefaser im Innennetz.

Sonderzubehör: Aufhängeseile (je nach Raumhöhe), Karabiner, Drehwirbel.

Einsatzmöglichkeiten: in Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten: Der Knautsack kann an Wand- und/oder Deckenaufhängungssystemen an 1 oder 2 Punkten befestigt werden (empfohlen wird unser HAIDIG-T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:

- ideal für die Therapie zur Förderung der tiefensensiblen (propriozeptiven) Körperwahrnehmung,
- mit hohem Aufforderungscharakter und sozialem Spielwert,
- zur intensiven Bewegungsfindung,
- Förderung der haptischen (taktilen) Wahrnehmung.

Pflege und Reinigung: Cordura ist ein sehr robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich somit leicht ausbürsten, andernfalls kann das Produkt mit Wasser und einer Seifenlösung gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden. Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol/Propanol). Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden!

Lieferhinweis: Achtung! Der Knautsack wird aus liefertechnischen Gründen in zwei Paketen geliefert. Bitte entfernen Sie das Netz und nutzen Sie die Füllwatte zum nachstopfen des Sackes. Im Innenleben des Knautsackes befindet sich ebenfalls ein Netz mit Füllwatte, dieses lässt sich über einen Reißverschluss öffnen.

Hinweis zur Wiederverwendbarkeit: Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte im einwandfreien technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Hersteller:

HAIDIG OHG
Ruhrallee 41a
44139 Dortmund
www.haidig.de

Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

