

H A I D I G


Kindergarten-, Therapiebedarf & Befestigungslösungen



Motorikrolle


Maximallast: 150 kg

Art.Nr. 2046714

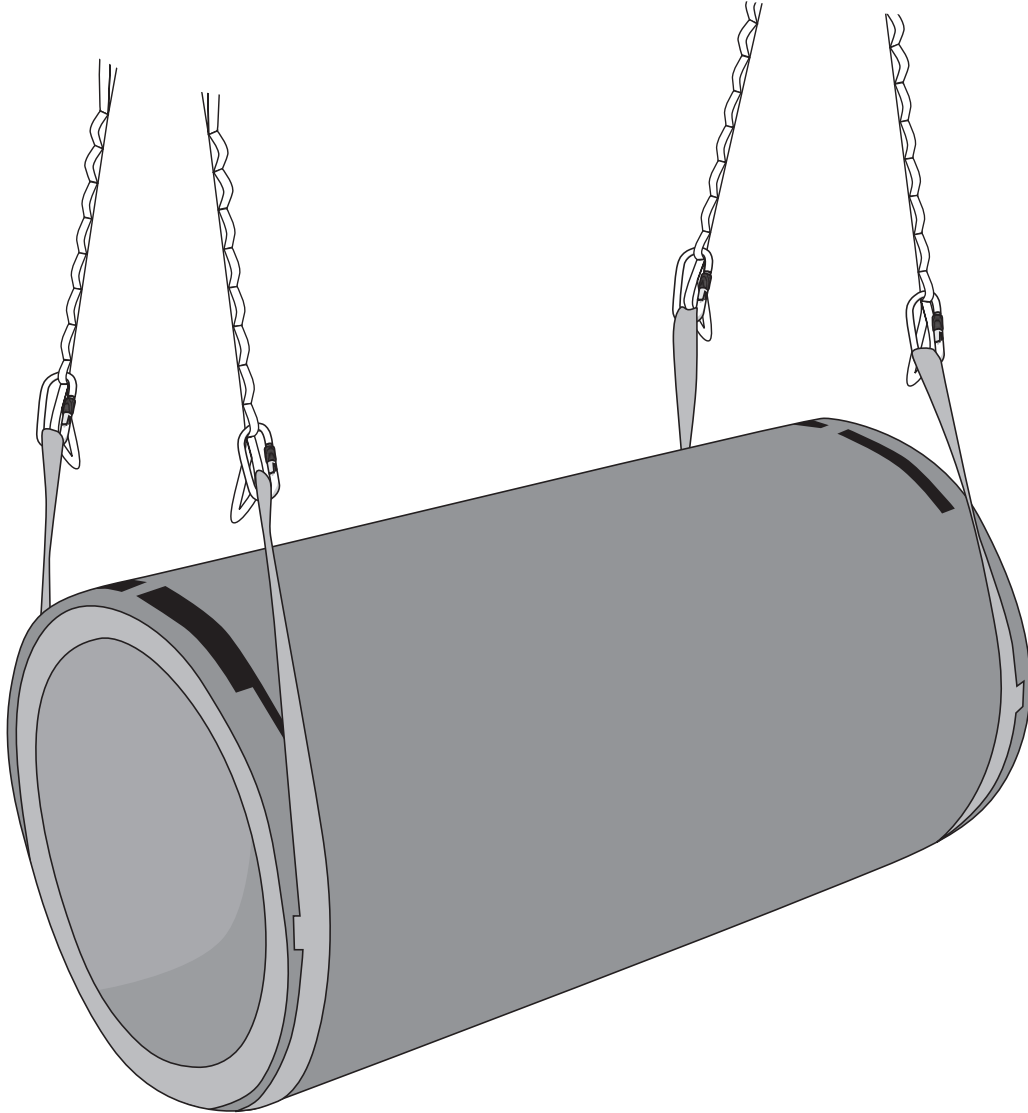

H A I D I G O H G
Ruhrallee 41a
44139 Dortmund
E-Mail: info@haidig.de
Telefon: +49 (0) 231 - 91 28 156
Fax: +49 (0) 231 - 91 28 157

Damit's sicher ist!

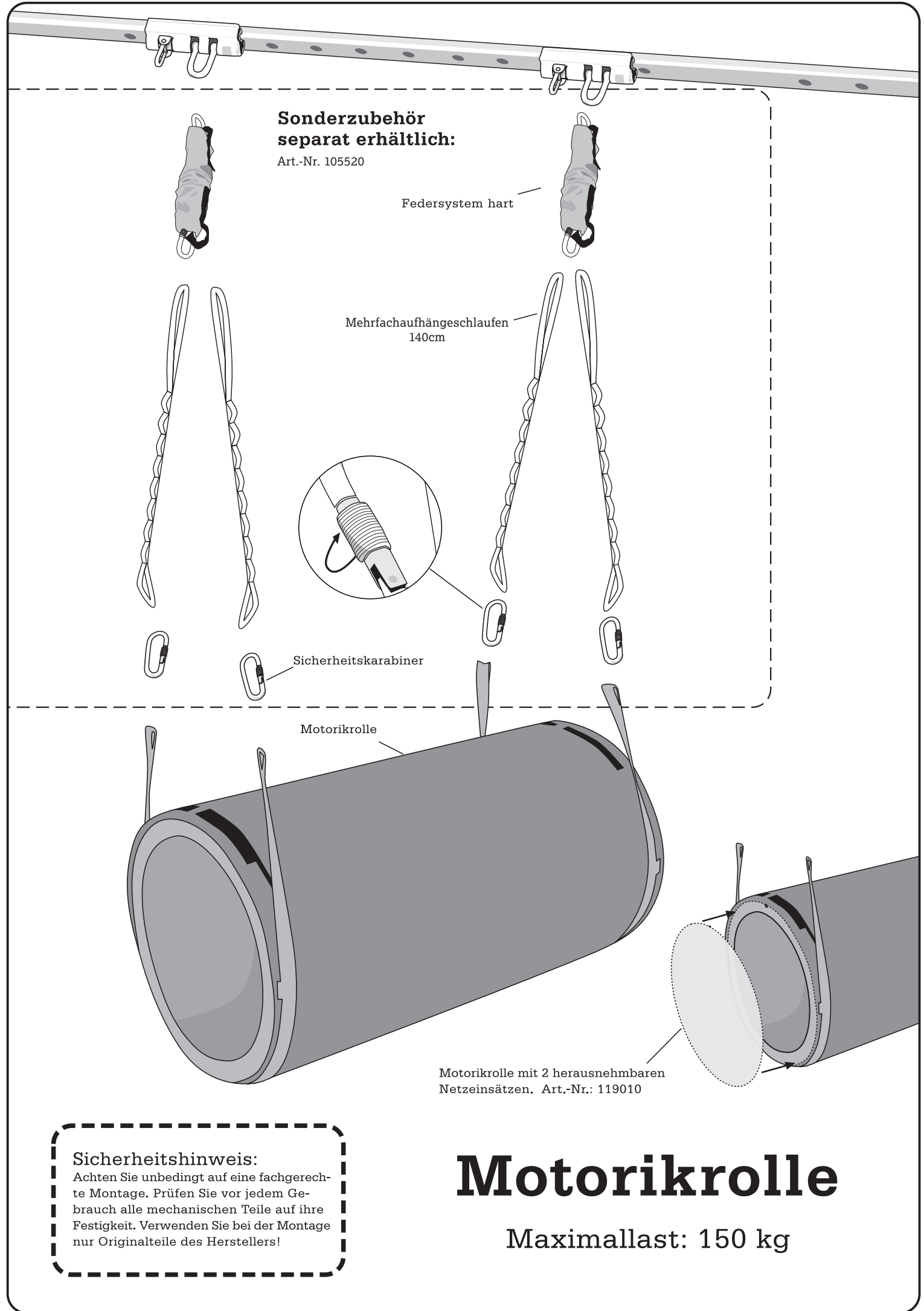

**Sonderzubehör
separat erhältlich:**

Art.-Nr. 105520

Federsystem hart

Mehrfachaufhängeschlaufen
140cm

Sicherheitskarabiner

Motorikrolle

Motorikrolle mit 2 herausnehmbaren
Netzeinsätzen. Art.-Nr.: 119010

Sicherheitshinweis:

Achten Sie unbedingt auf eine fachgerechte Montage. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit. Verwenden Sie bei der Montage nur Originalteile des Herstellers!

Motorikrolle

Maximallast: 150 kg

Herstellerinformation

Motorikrolle Artikel-Nummer: 119000

Das Produkt erfüllt die Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Sicherheitshinweise: Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar! In jedem Fall sollte der Patient angemessene Bekleidung (Sportkleidung, Turnschuhe oder Ähnliches) tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Handreifen, Ohringe, Piercings oder Ähnliche) ablegen.

Kontraindikationen bei Therapie: Kontraindikationen, die sich auf das Produkt beziehen, sind derzeit nicht bekannt. Die Verwendung des Produktes gilt als kontraindiziert, wenn nach Meinung des verantwortlichen Fachpersonals (Physiotherapeut/In, Ärztin/Arzt) eine Anwendung des Produktes eine Gefährdung des Patienten hervorrufen würde. Zum Beispiel aufgrund des Allgemeinzustandes des Patienten oder wenn eine körperliche Belastung bzw. die gewählte Methode mit dem mitgelieferten Therapiegerät als solche kontraindiziert ist.

Maximallast: 150 kg.

Material: Außen sehr fester Planenstoff dunkelblau/rot, Innen Multiplexringe mit festem Schaumstoff, Röhre komplett mit Schaumstoff gepolstert.

Größe: ca. 60 cm Außendurchmesser, Länge ca. 115 cm, ca. 50 cm Innendurchmesser.

Gewicht: ca. 13,1 kg.

Sonstiges: 4 Polypropylengurtschlaufen mit Klett-Flausch-Verbindung zum Aufhängen, formstabil (sinkt nicht ein). Bei Lieferung mit Netzeinsätzen, werden die Kunstfasernetze sehr einfach per Reißverschluss eingesetzt.

Sonderzubehör: Mehrfachaufhängeschlaufen, Karabiner, Federpakete.

Einsatzmöglichkeiten: in Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten: Die Motorikrolle kann an Deckenaufhängungssystemen an 2 oder 4 Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG-T-Schienensystem). Ebenfalls auf dem Boden für Balancierübungen nutzbar. Bitte NUR horizontal aufhängen!!! Mit Netzeinsätzen erreicht man einen Waschtrommeleffekt.

Beurteilungskriterien:

- vielseitige Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten,
- läd zum balancieren, rollen, durchkriechen, entspannen ein,
- Gleichgewichtsübungen, Tonusregulation, Arbeit mit der Schwerkraft,
- „Waschtrommel“ mit optionalen Netzeinsätzen und taktilem Material,
- einsetzbar in der Ergotherapie und der Psychomotorik, gleichermaßen,
- Förderung der Körperkoordination.

Pflege und Reinigung: Das Produkt kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann ist zu vermeiden.

Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol/Propanol).

Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden!

Hinweis zur Wiederverwendbarkeit: Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte im einwandfreien technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Hersteller:

HAIDIG OHG
Ruhrallee 41a
44139 Dortmund
www.haidig.de

Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

