

## Anleitung

**1296538**

## pedalo® - Reha – Bar S

Anleitung bitte vor der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes  
komplett lesen und aufbewahren

**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de



### Inhalt:

- 4 Stück Teleskopstützen x 4
- 2 Stück Barrenholme 70 cm
- 2 Stück Trittbretter
- 2 Radmodule mit Abstandshalter

### Allgemeine- und Warnhinweise:

**Achtung!** Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen

**Achtung!** Das pedalo® ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

**Achtung!** Das pedalo® nicht im Straßenverkehr oder auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden.

**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern- Erstickungsgefahr!

**Achtung!** Benutzen Sie das pedalo® ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

**Achtung!** Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

**Achtung!** Besteigen Sie das pedalo® immer zuerst auf dem unteren Trittbrett!!

**Achtung!** Nur auf ebenem Gelände mit glattem festem Belag verwenden. Beim Tragen des pedalo® niemals zwischen die Trittbretter greifen – KLEMMGEFAHR!

**Achtung!** Es ist darauf zu achten, dass die Füße nicht von den Trittbrettern rutschen.



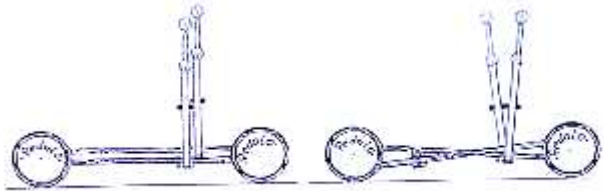
Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gelegentlich etwas Öl an die pedalo®-Achsen geben. Dazu Gerät hochkant stellen und in die Bohrungen der Trittschalen etwas Öl geben.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 280kg

<b>Montage Teleskopstützen:</b>		
<p>Die Teleskopstützen <b>müssen seitlich</b> an den Trittbrettern ab dem 6. Loch angeschraubt werden. Je Stütze 2 St. Schrauben M8 x 40 mm von oben im Abstand von 10 cm durch die Trittbrettbohrungen stecken. Von unten jetzt die Stützenlasche mit je 2 St. Muttern mit Unterlegscheiben fest anschrauben. Schrauben gelegentlich nachprüfen!</p>		
<p>Das pedalo®-Reha-bar,„S“ niemals ohne Stützen verwenden!</p>		
<p>Zwei Teleskopstützen werden jeweils oben mit einer Barren Lochleiste verbunden. (Die Haltekugeln vorher abschrauben. Die Schrauben werden zur Befestigung der Barren verwendet.) Die Teleskopstütze ist in der Höhe individuell einstellbar. Achten Sie auf gleiche Höheneinstellung der Stützen.</p>		
<b>Letzte Kontrolle vor dem Start:</b>		
<p>Bewegen Sie Ihr pedalo® zunächst mit der Hand vor und zurück. Es soll sich leicht bewegen lassen, ohne zu streifen. Es ist möglich, dass sich ein Trittbrett „verkeilt“. Dies lässt sich lösen, indem Sie das pedalo® an einem Rad kurz mit dem Fuß anschieben. Sind alle Radmuttern angebracht und fest verschraubt?</p>		
	richtig	falsch
<b>Die Vorzüge der pedalo® „S“ Serie</b>		
<p>Bauen Sie Ihr pedalo® ganz nach Ihren Vorstellungen um. Mit wenigen Erweiterungsteilen können eine Vielzahl von Varianten erreicht werden.</p>		
<p>Spurverbreiterung durch Abstandhalterset 5 od. 10 cm</p>	<p>Reha-pedalo® „S“</p>	<p>Reit-pedalo® „S“</p>
