

Der Sitzring ist ein Hilfsmittel zur kurzzeitigen Entlastung des Sakralbereiches nach z.B. Operationen im Anal-/Vaginalbereich oder nach der Geburt.

**Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.**

### Sicherheitshinweise

- Der Sitzring sollte nicht von Patienten mit einer Gummi- oder Latexallergie verwendet werden.
- Ein direkter Kontakt zu Salben oder Ölen muss vermieden werden, da diese Substanzen das Material angreifen können. Deshalb den Sitzring niemals ohne Bezug anwenden.
- Die maximale Belastbarkeit von 200 Kg, darf nicht überschritten werden.
- Den Sitzring aus hygienischen Gründen nur mit einer speziellen Niederdruck-Handpumpe aufpumpen. Keine Fahrradpumpe oder Ähnliches verwenden. Bei zu starkem Aufpumpen besteht Berstgefahr.
- Legen Sie den Ring nicht auf spitze oder scharfkantige Gegenstände
- Verwenden Sie keine beschädigten Ringe.

### Anwendung

Drehen Sie das Ventil leicht offen und pumpen Sie den Sitzring mit einer Handpumpe auf. Der Druck im Sitzring darf dabei nicht zu groß werden. Als Richtwert für den richtigen Druck gilt: Der Ring sollte mit einer Hand, ohne große Kraftanstrengung so zusammengedrückt werden können, dass Ober- und Unterseite des Ringes sich berühren.

Nach dem Sie das Ventil geschlossen haben, ziehen Sie den Bezug über den Ring und platzieren Sie den Ring unter der zu entlastenden Stelle.

Gegebenenfalls muss der Druck im Ring noch mehrmals angepasst werden.

### Reinigung

- Entfernen Sie den Bezug und Reinigen Sie die Oberfläche des Ringes mit einem milden Haushaltsreiniger.
- Zur Wischdesinfektion kann ein materialschonendes DGHM/VAH gelistetes Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die angegebene Einwirkdauer des Herstellers.
- Setzen Sie den Sitzring nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. UV-Licht und zu große Wärme zerstören das Material.
- Trocknen Sie den Sitzring nur bei normaler Raumtemperatur

### Entsorgung

Das Produkt kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.