

H A I D I G


Kindergarten-, Therapiebedarf & Befestigungslösungen



Therapieschaukel

Maximallast: 150 kg

Art.Nr.2168500

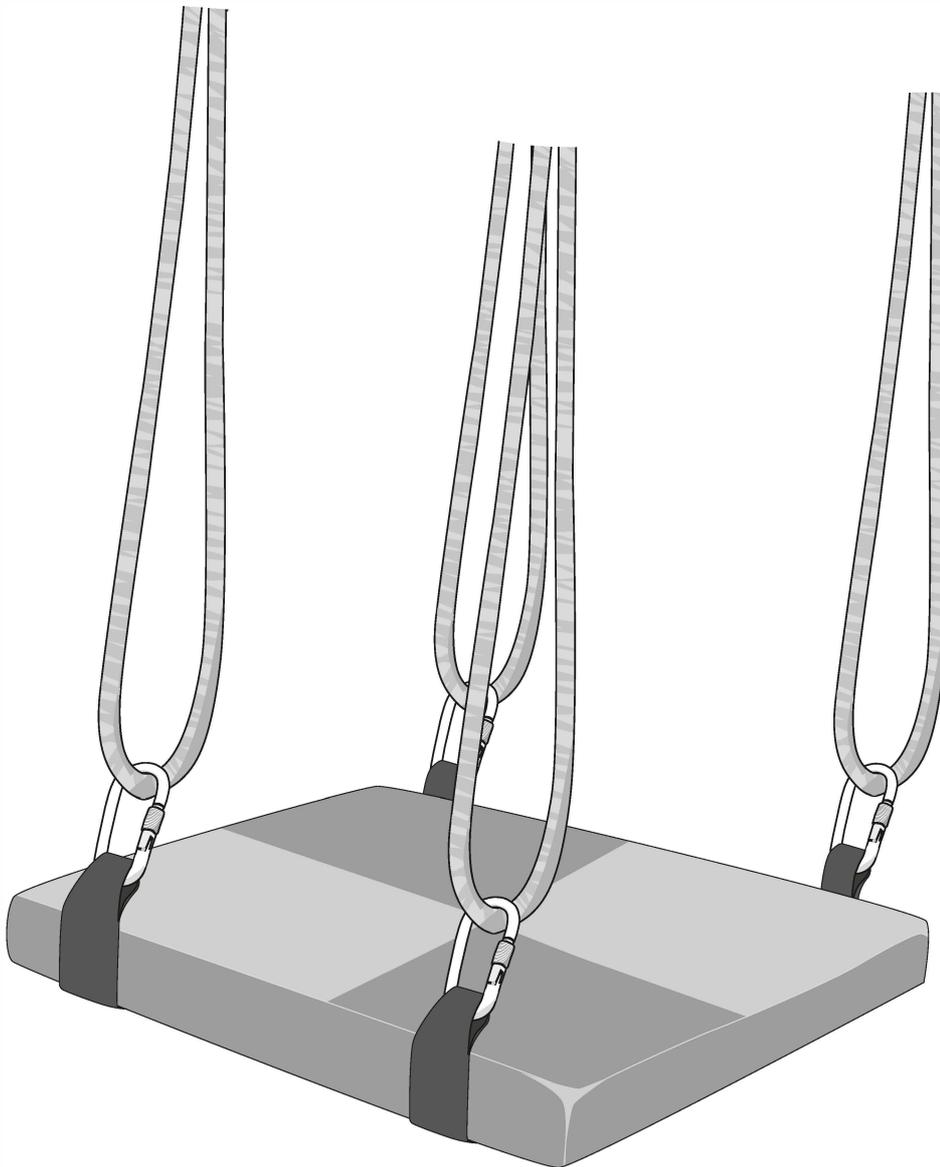


H A I D I G O H G
Ruhrallee 41a
D - 44139 Dortmund
E-Mail: info@haidig.de
Telefon: +49 (0) 231 - 91 28 156
Fax: +49 (0) 231 - 91 28 157


Damit's sicher ist!

Therapieschaukel

Maximallast: 150 kg

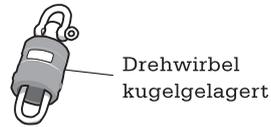



Pendelholz 60 cm

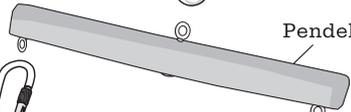



Schlaufe





Pendelholz 70 cm

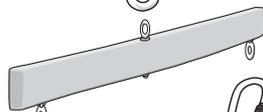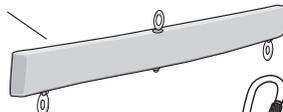

Sonderzubehör
separat erhältlich:

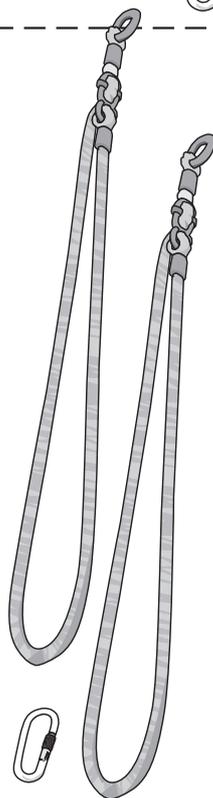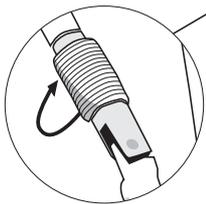

Sicherheitskarabiner

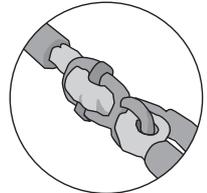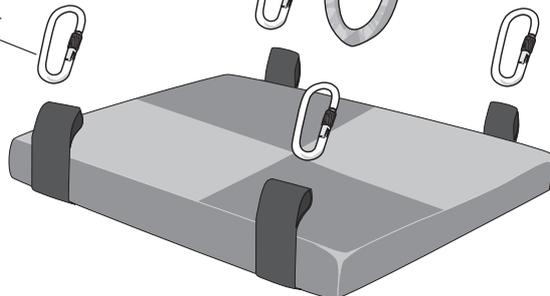

Sicherheitshinweis:

Achten Sie unbedingt auf eine fachgerechte Montage. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit. Verwenden Sie bei der Montage nur Originalteile des Herstellers!

HerstellereinFORMATION

Therapieschaukel (SI-Schaukel)

Artikel-Nummer: 117000

Sicherheitshinweise: Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar! In jedem Fall sollte der Patient angemessene Bekleidung (Sportkleidung, Turnschuhe oder Ähnliches) tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Handreifen, Ohringe, Piercings oder Ähnliche) ablegen.

Kontraindikationen bei Therapie: Kontraindikationen, die sich auf das Produkt beziehen, sind derzeit nicht bekannt. Die Verwendung des Produktes gilt als kontraindiziert, wenn nach Meinung des verantwortlichen Fachpersonals (Physiotherapeut/In, Ärztin/Arzt) eine Anwendung des Produktes eine Gefährdung des Patienten hervorrufen würde. Zum Beispiel aufgrund des Allgemeinzustandes des Patienten oder wenn eine körperliche Belastung bzw. die gewählte Methode mit dem mitgelieferten Therapiegerät als solche kontraindiziert ist.

Maximallast: 150 kg.

Material: Cordura dunkelblau/rot, Polypropylengurtband, Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert.

Größe: ca. 80 x 80 cm.

Gewicht: ca. 8,8 kg ohne Zubehör.

Sonstiges: mit 4 Polypropylenschlaufen zum Aufhängen, ebenfalls mitgeliefert werden 4 Aufhängeseile á 250 cm (höhenverstellbar), 4 Sicherheitskarabiner.

Sonderzubehör: Artikel-Nummer 117500 Zubehör-Paket (bestehend aus: 1x Kugellagerdrehwirbel, 3 Buche-Pendelhölzer, 2 x 62 cm und 1 x 42 cm lang, 2 Gurtschlaufen á 20 cm und 9 Sicherheitskarabiner).

Einsatzmöglichkeiten: in Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten: Die Therapieschaukel kann an Deckenaufhängungssystemen an 4, 2 und einem Punkt befestigt werden (empfohlen wird unser HAIDIG-T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:

- unverzichtbar für z.B. Gleichgewichtsübungen, Tonusregulation, Arbeit mit der Schwerkraft,
- Aktivierung der Aufrichtereaktionen,
- Stimulation der extraokularen Muskulatur usw.,
- einsetzbar in der Ergotherapie und der Psychomotorik, gleichermaßen,
- für die Behandlung von Kindern und Erwachsenen.

Pflege und Reinigung: Cordura ist ein sehr robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich somit leicht ausbürsten, anderenfalls kann das Produkt mit Wasser und einer Seifenlösung gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden. Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol/Propanol). Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden!

Hinweis zur Wiederverwendbarkeit: Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte im einwandfreien technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Hersteller:

HAIDIG OHG
Ruhrallee 41a
44139 Dortmund
www.haidig.de

Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

