



1. **Produktnavn**

Transportvogn

2. **Varenummer**

S0422879

3. **Farve**

Naturligt træ finish

4. **Enkel beskrivelse**

Så ROMPA panelerne kan være mobile og skubbes fra rum til rum.

5. **Indhold**

- 1 transportvogn

6. **Den bedste brug**

Bruges med ROMPA Deluxe vægpaneler.

7. **Kompatible produkter fra ROMPA**

S0422871 Farve kommando center

S0422869 Multifinity Explorer

S0422872 Fyrværkeri extravagant

S0422870 Lyd til syn Showtime

S0422873 Color Catch Combo

S0419210 Lyskilde

S0422611 LED Projektør

S0422612 LED100 projektor

S0421509 ROMPA Regnbue WiFi Projektør



## 8. Opstart

- Fastgør to paneler til transportvognen.
- Forbind ekstra produkter efter behov – ROMPA projektorer og lyskilder
- Tilslut panelerne til den centrale stikdåse.
- Tilslut kablet fra transportvognen til en vægkontakt.

## 9. Detaljeret beskrivelse

Gør ROMPA panelerne mobile så de kan skubbes fra rum til rum, hvor man har brug for dem. Perfekt til brug mellem stole og senge. Ideelle hvor det ikke er muligt at have dem væghængte. Kan bruges til en eller 2 ROMPA vægpaneler. Der er kun en kontakt fra vognen, men der er integreret strømforsyning til 6 enheder. Der kan også være 2 lyskilder indeni og 2 projektorer (alle bestilles separat) på top midterhylden. Er ikke egnet til brug sammen med Bubble panelet S0422874.

## 10. Sikkerhed

- **Overvåg altid brugen af dette produkt**
- Brug bremserne på hjulene så transportvognen holdes på plads.
- Brug håndtagene når vognen flyttes.
- Når vognen har en lyskilde på toppen, og fiberoptikstrengene ud af sidehullerne, så vær sikker på at fiberoptikstrengene er sikkert af vejen, så de ikke fanges under hjulene – enten kan de fjernes, eller de kan stuves af vejen indeni vognen.
- Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.
- Fjern ikke møtrik kapperne (Cirklerne på billedet), disse dækker Hjulfikseringerne.



## 11. Tekniske specifikationer

Størrelse: (BxDxH) 77,5 x 71,5 x 140 cm

Vægt: 18 kg

Kontakter: 6 strømstik tilslutning

## 12. Installering

1. Fastgør to paneler til vognen. Se de separate instruktioner der leveres med panelerne. Alle ROMPA paneler på listen ovenover kan bruges. Bemærk at Double Bubbel Bonanza ikke kan bruges med vognen.

Sikring af de to opsætningsbeslag (leveres med hvert panel, et til toppen og et til bunden) til panelet med det korrekte antal fikseringer, ikke længere end 10 mm og brug de borede huller. Gentag på den anden side af vognen hvis der skal to paneler på. Se panel instruktionen for flere detaljer omkring påsætning.



2. Tilslut panel(er) til stikdåsen.



3. Placer op til 2 lyskilder inden i vognen og sæt også dem i stikdåsen. Sæt fiberoptikstrengene gennem de cirkulære huller på den lukkede side af vognen.
4. Placer op til 2 projektorer på tophylden af vognen og sæt også dem i stikdåsen. Brug udskæringerne i siderne (en på hver side af hylden) til projektor kablerne. Udskæringerne er brede nok til et IEC kabel (kettle lead). Hvis der er nogen risiko for at projektor kan falde af, eller skubbes ned af hylden kan I sikre projektor ved at skrue den fast. Dobbelt tjek projektor positionerne inden I skruer dem fast til hylden, så fejl undgås.
5. Forbind ikke andre produkter til strømskinnen.
6. Sæt ledningen fra vognen i en vægkontakt.



### 13. Vedligeholdelse

1. Rengør med en fugtig klud. Udsæt ikke for vand. Brug ikke blødgørere eller produkter med slibemidler
2. Opbevares og bruges tørt, rent og indendørs.
3. Håndteres med omhu.